


TÜRKÇE



Smile Creator

THE FUTURE OF
COSMETIC
DENTISTRY

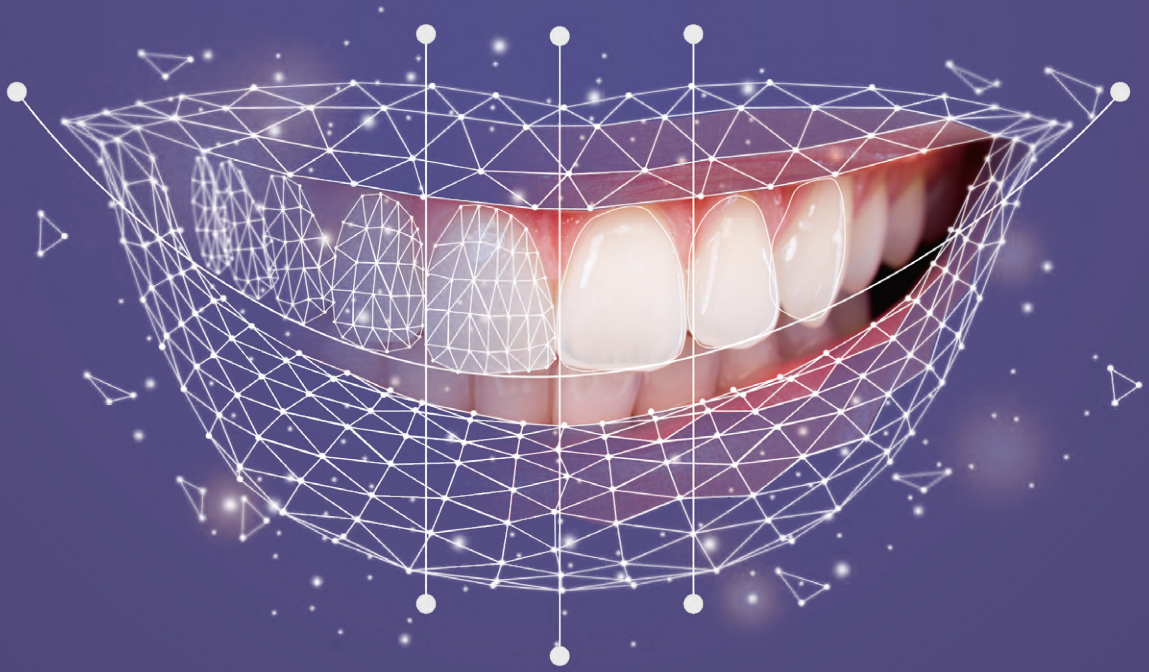

exocad



Smile Creator tedavi süresini kısaltıyor ve hastalarımla iletişimi geliştiriyor.

Dr. Zhiqiang Luo
DDS/MS

Smile Creator hastalara kapsamlı tedavi planları ve en kısa sürede öngörülebilir sonuçlar verir.

Dr. Zhiqiang Luo, çalıştığı prestijli Pekin kliniğinde Smile Creator'ın iletişimi nasıl kolaylaştırdığını anlatıyor.

Neden Smile Creator kullanıyorsunuz?

Dr. Luo: Eskiden hastalar mum modelini görmek için bir hafta veya daha fazla beklerdi. Artık hasta ağız içi taramadan tasarladığım estetik sonucu hemen görebiliyor. Bu da zaman kazandırıyor ve hastamla iletişimi geliştiriyor. Smile Creator'daki ön tasarımı fikirlerime göre tamamlayabiliyorum. Diş teknisyeni sanal muamlayı benim tasarıma göre optimize ediyor.

Yazılımı muayenehanenize nasıl entegre ediyorsunuz?

Dr. Luo: İlk tasarımı hastaya gösteriyorum ve önerilen tedaviyi açıklıyorum. Hasta plandan memnun kaldıktan sonra bu verileri teknisyene gönderiyorum, o da tasarımı tamamlıyor ve diş şeklini ve oklüzyonu optimize etmek için ayarlamalar yapıyor. Daha sonra sanal muamla 3D olarak basılıyor ve bir maket klipsli gülümseme yapıp klinikte bana gönderiliyor.

Smile Creator hastalarla çalışmanızı nasıl etkiliyor?

Dr. Luo: Smile Creator hastalara kapsamlı tedavi planları ve en kısa sürede öngörülebilir sonuçlar verir. Smile Creator görselleştirmeleri, hastaların tedavi planı hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Bu da bir diş hekimi olarak bana duydukları güveni artırıyor ve olumlu sonuçların önünü açıyor.*

Dr. Zhiqiang Luo
DDS/MS (China)

exoBLOG

*Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz:

exocad.com/exoblog/story/build-patient-trust-with-smile-design





Vizyoner, çok yönlü, kıymetli

Entegre gülüş tasarımınızın mimarı in-CAD Smile Creator

Smile Creator ile katma değer yaratın—exocad'in öngörülebilir estetik gülüş düzeltmeleri için yenilikçi in-CAD gülüş tasarımı çözümü. Alıştığınız exocad DentalCAD platformuna entegre edilen Smile Creator, diş hekimlerinin estetik planlama sırasında protez fizibilitesini değerlendirmelerini sağlar.

Kapsamlı diş kütüphanemizden önerilen diş yerleşimleri kolayca kişiselleştirilebilirken, ortaya çıkan şekil çeşitli açılardan 3D olarak görüntülenebilir. Hasta fotoğrafları ve 3D görüntüleri birleştirerek sonuç üzerinde daha fazla kontrol elde edebilir ve diş laboratuvarları, diş hekimleri ve hastalar arasındaki iletişimi geliştirebilirsiniz. Hastanın dişlerine, gülüşüne ve yüzüne estetik bir genel bakış değerlendirilerek restoratif tedavi planı için gerçekçi bir perspektif sunulur. Rehberli iş akışları ve kapsamlı özellikleri ile *Smile Creator*, kozmetik diş hekimliği için sezgisel ancak güçlü bir dijital planlama çözümüdür.

Tek başına veya DentalCAD'e eklenti modülü olarak mevcuttur.

Yeni bir gülümsemeye giden basit adımlar




1. Adım

Ekartör görüntüyü ağız içi tarama görüntüsü ile hizalayın.




2. Adım

Ekartör görüntüyü gülümseme görüntüsüyle hizalayın.

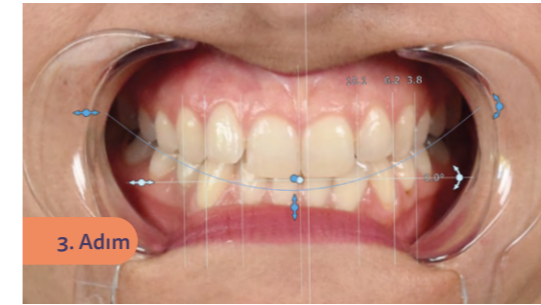


3. Adım

Yapay zekaya dayalı otomatik karakteristik algılama.

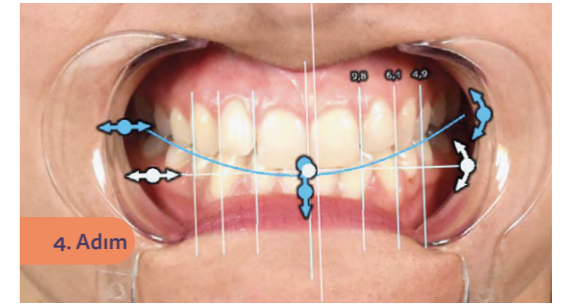

4. Adım

Gerekirse yardımcı çizgiler ve gülümseme eğrileri ekleyin.

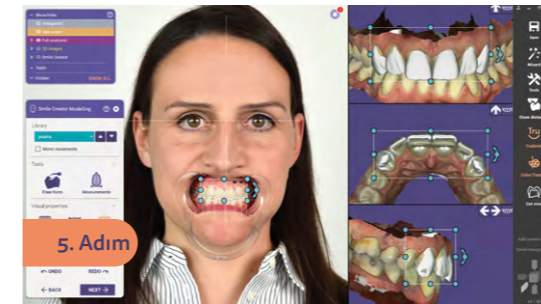

5. Adım

Zahmetsizce 2D olarak tasarlayın ve sonuçları gerçek zamanlı olarak çeşitli açılardan 3D olarak görüntüleyin.



6. Adım

Öngörülen sonuçların gerçekçi önizlemesi.

Akıllı telefonunuzda bu hasta vakasına göz atın




exocad'in ücretsiz 3D görüntüleyicisini keşfedin.

exocad
webview

UYGULAMAYI
ŞİMDİ İNDİRİN!

webview.dental/demo

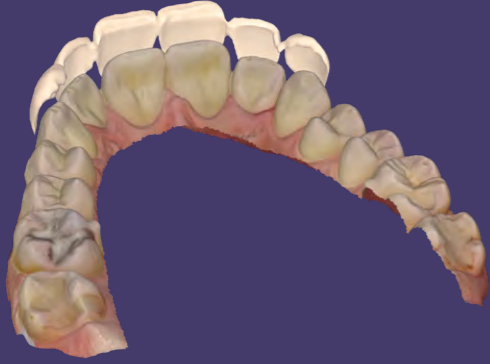

Hastalar yeni gülüşlerini basılmış klipslerle fiziksel olarak deneyebilirler.

exocad'in *Model Creator*'ı ile tanısal mumlu modeller oluşturun.



Akıcı tasarım iş akışı

Tasarım süreci boyunca sihirbaz rehberliğindeki iş akışlarından, hastalarınızla sorunsuz iletişimden ve laboratuvar ile klinik arasında kolaylaştırılmış işbirliğinden yararlanın. Basit yönlendirmeler, görüntü yükleme ve yüz analizinden diş kurulumuna kadar gülüş tasarımı sürecinin her adımında size rehberlik eder. Diğer gülüş tasarımı çözümlerinin aksine, *Smile Creator* gülüş tasarımları 3D olarak tasarlanır. Bu aynı zamanda *Smile Creator*'ın exocad *DentalCAD* ile entegrasyonu sayesinde tanısal mumlu, geçici ve nihai restorasyonların doğrudan üretilmesini sağlar.

Öngörülebilir sonuçlar

Tedaviye başlamadan önce hastalar yeni gülüşleri hakkında net bir izlenime sahip olur ve diş hekimleri tasarımın işlevini ve estetiğini değerlendirebilir. Bu, hasta katılımını artırır ve beklentileri karşılayan öngörülebilir nihai sonuçlar sağlar.

Dijital gülüş tasarımı paylaşın




Tasarım dosyasını kaydedin ve *dentalshare webview* bağlantısını kullanarak tasarımı hastayla paylaşın veya bir HTML dosyası olarak dışa aktarın.

Hastalarla iletişim kurun



Smile Creator tasarım önizlemesini uzaktan görüntülemek için *dentalshare* bağlantısını veya HTML dosyasını herhangi bir mobil cihazda açmanız yeterlidir.

Laboratuvarlarla işbirliği yapın

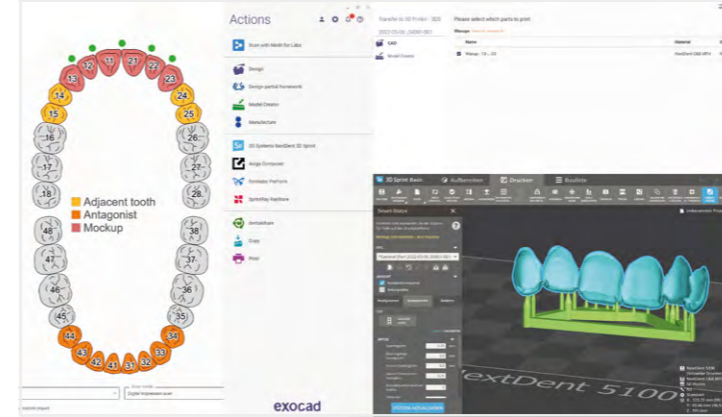

dentalshare'i kullanarak tasarım projenizi bir laboratuvarla paylaşın veya şirket içi üretim için klipsli tasarım verilerinizi CAD'den 3D baskıya aktarmak için *exoprint*'i kullanın.

Hasta katılımını artırın





Kendi bünyenizde ürettiğiniz ve nihai sonucun önizlemesini sunan klipslerle hastaların ilgisini çekin.

Kaydedin ve çoğaltın:


Gülümseme tasarım vakaları

Kolay işbirliği ve dokümantasyon için bir rapor oluşturun. Gülüş tasarım raporu, *Smile Creator*'da bir tasarım tamamlandıktan sonra otomatik olarak oluşturulur.

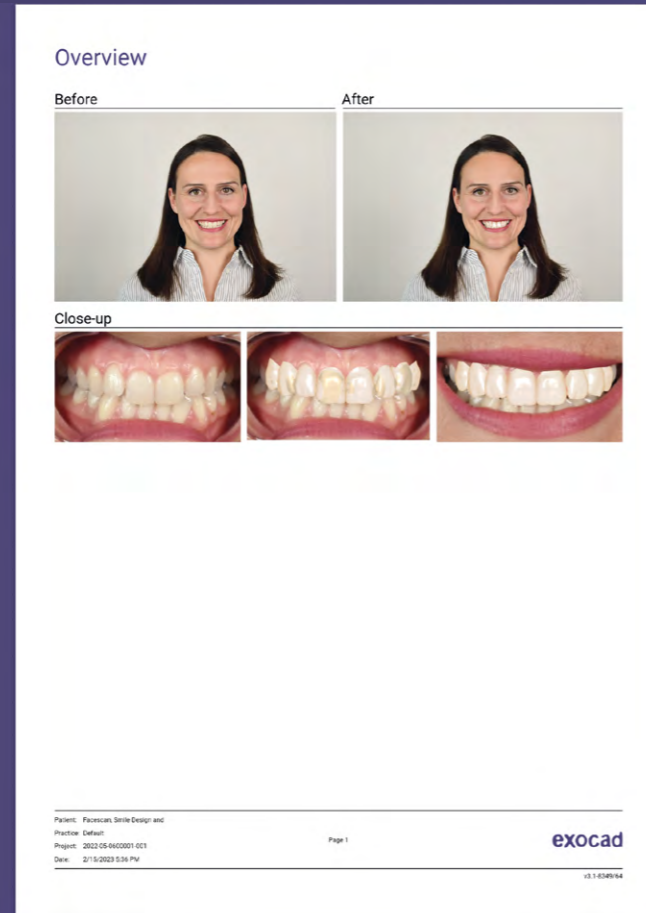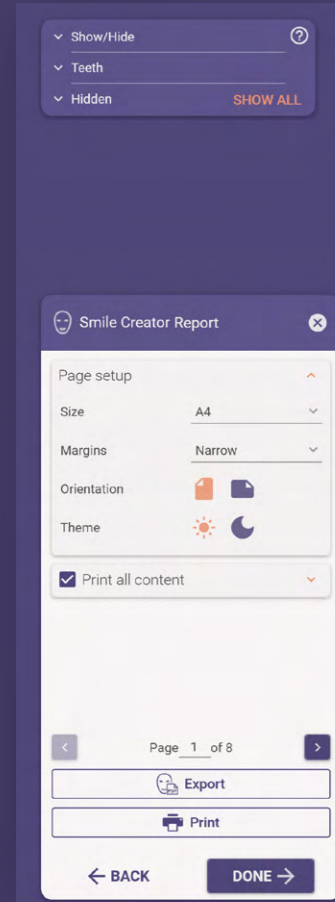

Tooth Design

Outlined Tooth Setup

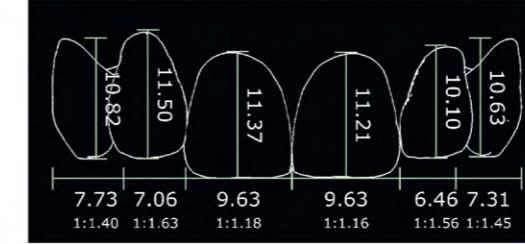

Measurements

Tooth Number	Width (mm)	Height (mm)	Ratio
13	7.73	10.82	1:1.40
12	7.06	11.50	1:1.63
11	9.63	11.37	1:1.18
21	9.63	11.21	1:1.16
22	6.46	10.10	1:1.56
23	7.31	10.63	1:1.45


Close-up



Scan - Current Situation



Scan - Before and After Design Setup

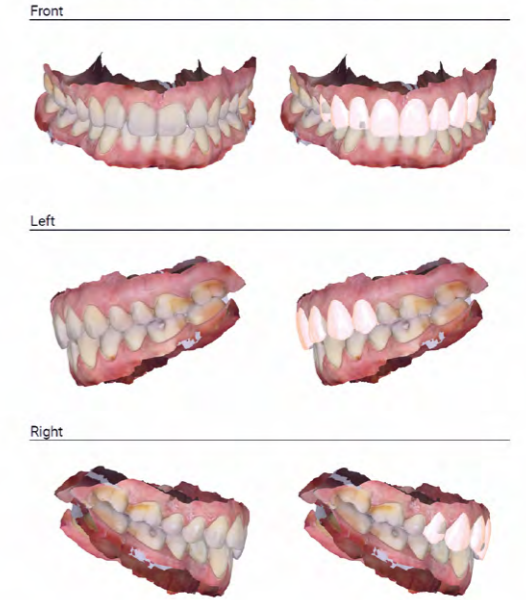

Educate. Inspire. Design.

CREATOR CENTER

Smile Creator ile nasıl güzel gülüşler yaratacağınızı kendiniz öğrenmek ister misiniz?

Creator Center'da çevrimiçi olarak sunulan ücretsiz *Smile Creator* seminerlerini keşfedin.

Her seviyeden katılımcı katılabilir.

www.exocad.com/creatorcenter



Tüm iş akışını seçin veya nihai gülüş tasarımı raporunuza dahil etmek için tasarım sürecinin farklı aşamalarını seçip belirleyin.



exocad ve Smile Creator

Avantajlarınız neler?

1

Daha iyi hasta iletişimi

Hasta fotoğraflarını kullanarak gülüş tasarımlarının gerçekçi önizlemelerini oluşturun.

2

Daha öngörülebilir sonuçlar

Daha iyi ön izleme seçenekleri, daha fazla hasta katılımı, daha az tekrar ve nihai sonuçlardan daha yüksek memnuniyet anlamına gelir.

3

Gerçek zamanlı değerlendirme

Smile Creator, gerçek ve 3D diş kurulumlarını çoklu açılardan görselleştirir.

4

Sorunsuz iş akışları

Bu in-CAD gülüş tasarımı modülü, protez uygulaması, tanısal mumlamalar ve daha fazlası için temel olarak gerçek, 3D diş kurulumlarını sorunsuz bir şekilde oluşturmanızı sağlar.

5

Geniş diş kütüphaneleri

Smile Creator harika dişlerden oluşan geniş bir kütüphane içerir ve daha da geniş bir seçim için ek kütüphaneler satın alınabilir.

6

Gizli maliyetler yok

Smile Creator ile sınırsız sayıda vakayı tedavi edin.

Imagine the CADabilities

Hastaların seveceği gülüşler tasarlayın



Magdalena Kotula, Dental Technician

Bölgenizde bir bayi bulun:
[exocad.com/partners](https://www.exocad.com/partners)

exocad.com

exocad bayiniz:

MODE
IMPLANT

Abdi İpekci Cad. No:58 Bayrampasa 34030 İSTANBUL / TURKEY

+90 (212) 612 64 09

info@modeimplant.com

modeimplant.com

Bazı ürünler tüm pazarlarda satış için yasal olarak onaylanmamış/serbest bırakılmamış olabilir.
Güncel ürün çeşitliliği ve bulunabilirliği için lütfen yerel exocad satıcınızla iletişime geçin.